

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodontji oraz epitezy twarzy**

Symbol kwalifikacji: **MED.06**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut.

MED.06-01-25.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na **KARCIE OCENY** w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. **KARTĘ OCENY** przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Obetnij otrzymany model orientacyjny na kształt siedmioboku i przygotuj go do wykonania łyżki indywidualnej.

W celu skorzystania z obcinarki do gipsu podnieś kartkę z napisem „OBCINARKA”.

Obcięty i przygotowany model do wykonania łyżki indywidualnej zgłoś do oceny przez podniesienie ręki.

Następnie wykonaj perforowaną łyżkę indywidualną z akrylu samopolimeryzującego, zgodnie z zaleceniami lekarza dentysty zawartymi w Karcie laboratoryjnej, technologią wykonawstwa ruchomych protez zębowych oraz instrukcją użytkowania otrzymanego materiału.

Gotową łyżkę indywidualną wraz z modelem orientacyjnym pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Zadanie wykonuj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne narzędzia i sprzęt.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- model orientacyjny przygotowany do wykonania górnej łyżki indywidualnej,
- górna łyżka indywidualna

oraz

przebieg obciążenia i przygotowania modelu orientacyjnego do wykonania górnej łyżki indywidualnej, przygotowania masy akrylowej samopolimeryzującej oraz wykonania górnej łyżki indywidualnej.

KARTA LABORATORYJNA

NR PRACY 256/2024

ZLECAJĄCY:

Gabinet stomatologiczny **PROVITA**

ul. Głowackiego 8
00-540 Kostrzyn

WYKONAWCA:

Pracownia protetyczna **DENTO-LABUL**

ul. Żwirowa 6
00-540 Kostrzyn

PACJENT:

Kazimierz Mokry

ul. PCK 12/11
00-540 Kostrzyn

ZLECENIE:

Proteza całkowita górna

Data przyjęcia: **25.11.2024 r.**

Data oddania: **20.01.2025 r.**

STAN UZĘBIENIA

17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37

ZALECENIA

Proszę:

- narysować zasięg płyty łyżki indywidualnej, który od strony podniebiennej powinien kończyć się na tylnej granicy podniebienia twardego, a od strony przedsionkowej być oddalony na 1-2 mm od granicy ruchomej błony śluzowej,
- zablokować podcienie wyrostka zębodołowego i wypełnić ubytki poekstrakcyjne po usuniętych kłach woskiem,
- umieścić uchwyt łyżki wzdłuż szwu podniebiennego na wysokości zębów przedtrzonowych,
- wykonać perforację łyżki na całym obszarze płyty.

dr n. med. Piotr Kowalski

/podpis lekarza/