

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**

Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>						
---	---	--	--	--	--	--	--

Rezultat 1: Karta dekontaminacji

Wpisane:

1	w wierszu Endoskop elastyczny w kolumnie: A: Pracownia Endoskopii; B: 1; C: manualna przez zanurzenie; D: Nie dotyczy; E: Nie dotyczy						
2	w wierszu Ustnik w kolumnie: A: Pracownia Endoskopii; B: 7; C: manualna przez zanurzenie; D: 5; E: para wodna 134°C lub 121°C						
3	w wierszu Kleszczyki biopsyjne w kolumnie: A: Pracownia Endoskopii; B: 4; C: manualna przez zanurzenie; D: 3; E: para wodna 134°C						
4	w wierszu Wiertarka ortopedyczna bez nasadek w kolumnie: A: Blok Operacyjny; B: 1; C: manualna przez przecieranie; D: 1; E: para wodna 134°C						
5	w wierszu Zestaw do szycia w kolumnie: A: Poradnia Chirurgiczna; B: 10; C: manualna przez zanurzenie; D: Nie dotyczy; E: Nie dotyczy						
6	w wierszu Maski krtaniowa w kolumnie: A: OIOM; B: 1; C: manualna przez zanurzenie; D: Nie dotyczy; E: Nie dotyczy						
7	w wierszu Fartuchy chirurgiczne w kolumnie: A: Blok Porodowy; B: Nie dotyczy; C: Nie dotyczy; D: 2; E: para wodna 121°C						

Rezultat 2: Etykieta

Wpisane:

1	w wierszu Nazwa oddziału: Blok Porodowy						
2	w wierszu Nazwa i ilość wyrobów medycznych: Fartuchy chirurgiczne – 2 sztuki						
3	w wierszu Data sterylizacji: data egzaminu (dd-mm-rr)						
4	w wierszu Data przydatności do użycia: Trzy tygodnie od daty egzaminu (dd-mm-rr)						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Pakiet oznakowany Etykieta

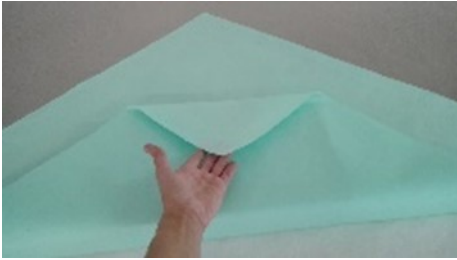
1	Pakiet wykonany jest techniką skośną, zaklejony jest taśmą wskaźnikową lub taśmą neutralną oraz wskaźnikową, taśma przyklejona jest po obu stronach wystającej wypustki/rogu papieru krepowanego						
2	Pakiet wykonany jest estetycznie w taki sposób, że papier krepowany nie jest pognieciony, nie jest rozerwany						
3	Do pakietu przyklejona jest Etykieta taśmą neutralną						

Numer stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i pakietu z fartuchami chirurgicznymi

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.

Zdający:

1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy								
2	przystąpił do dezynfekcji rąk bez biżuterii: pierścionków, bransoletki, innych ozdób, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap pięciokrotnie								
3	W jednym z etapów pocierał zewnętrzne części palców jednej dłoni o wewnętrzną część drugiej dłoni z palcami złączonymi, zmienił ręce								
4	umieścił dwa fartuchy chirurgiczne po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego								
5	umieścił w pakiecie chemiczny wskaźnik wieloparametrowy/typ 4								
6	zawinął wewnętrzny arkusz zakrywając fartuchy, sformułował trójkąt								
7	pozostawił wypustkę/róg z pierwszej warstwy papieru krepowanego								
8	wykonując drugą warstwę opakowania z papieru w innym kolorze, również sformułował trójkąt (jak w kryterium 6) oraz w ostatnim etapie pakowania pozostawił wypustkę/róg papieru								
9	uporządkował stanowisko pracy: zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym, ułożył wszystkie materiały, z których korzystał, wyrzucił czepek do kosza z odpadami								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis