

**EGZAMIN ZAWODOWY
 Rok 2021
 ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
 do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-21.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
 2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: Protokół niezgodności

Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane w kryteriach pod warunkiem ich poprawności merytorycznej

Wpisane:

1	Haki chirurgiczne: brak 1 szt. haka rozwieracza, brak 1 szt. haka Farabeuf, brak 1 szt. haka dwuzębego								
2	Narzędzia laryngologiczne: brak 1 szt. wziernika usznego, brak 2 szt. wzierników nosowych								
3	Zestaw ginekologiczny: brak 1 szt. kleszczyków okienkowych, brak 2 szt. skrobaczek, brak 1 szt. rozszerzacza Hegar								
4	Akcesoria elektrochirurgiczne: brak 1 szt. elektrody monopolarnej, brak 1 szt. elektrody bipolarnej								
5	Sprzęt anestetyczny: brak 2 szt. maseczek twarzowych, brak 1 szt. maseczki krtaniowej								
6	Akcesoria do lamp operacyjnych: brak 1 szt. uchwytu								

Rezultat 2. Karta procesów mycia i dezynfekcji

W kolumnie Decyzja o zwolnieniu wsadu wpisane w wierszu:

1	Haki chirurgiczne: TAK								
2	Narzędzia laryngologiczne: TAK								
3	Zestaw ginekologiczny: NIE								
4	Akcesoria elektrochirurgiczne: TAK								
5	Sprzęt anestetyczny: NIE								
6	Akcesoria do lamp operacyjnych: NIE								

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Karta procesów sterylizacji

Wpisane:

1	w kolumnie Zestaw zwolniony do procesu sterylizacji wpisane TAK <u>wyłącznie</u> w wierszach: Haki chirurgiczne, Narzędzia laryngologiczne, Akcesoria elektrochirurgiczne						
2	w kolumnie Zestaw zwolniony do procesu sterylizacji wpisane NIE <u>wyłącznie</u> w wierszach: Zestaw ginekologiczny, Sprzęt anestezyjologiczny, Akcesoria do lamp operacyjnych						
3	w kolumnie Metoda i parametry procesu sterylizacji wpisane NIE DOTYCZY w wierszach: Zestaw ginekologiczny, Sprzęt anestezyjologiczny, Akcesoria do lamp operacyjnych						
4	w kolumnie Metoda i parametry procesu sterylizacji, w wierszu Haki chirurgiczne wpisane: sterylizacja parowa, temperatura 134°C, czas sterylizacji: minimum 3 minuty						
5	w kolumnie Metoda i parametry procesu sterylizacji, w wierszu Narzędzia laryngologiczne wpisane: sterylizacja parowa, temperatura 121°C, podany czas sterylizacji: minimum 15 minut						
6	w kolumnie Metoda i parametry procesu sterylizacji, w wierszu wpisane Akcesoria elektrochirurgiczne: sterylizacja parowa, temperatura 134°C, czas sterylizacji 3 minuty						

Rezultat 4: Pakiet z naklejoną Etykieta

1	na etykiecie, w wierszu Dopuszczalny czas przechowywania wpisane: dzień-miesiąc-rok, dwa miesiące od daty sterylizacji +/-2 dni						
2	na etykiecie, w wierszu Zawartość pakietu wpisane: pęseta chirurgiczna – 1 szt., pęseta anatomiczna – 1 szt., igłotrzymacz 1 szt., nożyczki chirurgiczne 1 szt.						
3	opakowanie pakietu składa się z dwóch niezależnych warstw papieru krepowanego						
4	pakiet jest zaklejony taśmą wskaźnikową lub taśmą neutralną oraz wskaźnikową, taśma przyklejona jest po obu stronach wystającej wypustki						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, kontroli czystości i konserwacji narzędzi oraz pakietu do sterylizacji
Zdający zgłasza gotowość do wykonania zadania przez podniesienie ręki

Zdający:

1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy						
2	wykonał co najmniej pięciokrotnie wszystkie etapy dezynfekcji rąk zgodnie z techniką Ayliffe'a						
3	wybrał z zestawu 4 sztuki narzędzi: pęsetę chirurgiczną, pęsetę anatomiczną, igłotrzymacz oraz nożyczki chirurgiczne. skontrolował narzędzia wizualnie, sprawdził czystość wszystkich powierzchni						
4	po kontroli czystości naniósł środek konserwujący tylko w obrębie przegubów igłotrzymacza oraz nożyczek, rozprowadził środek konserwujący poprzez wykonanie kilkakrotnych ruchów otwierania i zamykania narzędzi						
5	zapiął igłotrzymacz na pierwszy ząbek lub pozostawił otwarty						
6	ułożył wszystkie wybrane narzędzia na tacy narzędziowej, umieścił w niej chemiczny wskaźnik emulacyjny/typu 6						
7	zawinął arkusz zakrywając tacę z wyrobami medycznymi, po zapakowaniu tacy pozostawił wypustkę z jednego z narożników papieru krepowanego w kolorze zielonym						
8	sformułował z papieru koloru białego trójkąt oraz pozostawił po kolejnych krokach pakowania wypustkę jednego z rogów papieru (jak w kryterium 7) ułatwiający jałowe otwarcie pakietów						
9	zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania narzędzi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym oraz uporządkował wszystkie materiały, z których korzystał podczas wykonywania pakowania						
10	zjął czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis