

**EGZAMIN ZAWODOWY
 Rok 2024
 ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
 do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-24.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **MED.12**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
 2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji

Wpisane w kolumnie:

1	C: dla Dłuta - 5; dla Nożyczek naczyniowych - 9; dla Światłowodu - 5;								
2	D: 2 x Oddział IOM, 4 x BO Urazowy								
3	E: Nr 2 dla dwóch pozycji: Bronchofiberoskopu oraz Nasofiberoskopu								
4	F: 60°C, 5 min dla Bronchofiberoskopu oraz Nasofiberoskopu								
5	F: 93°C, 10 min dla Kerisona oraz dla Sondy neurochirurgicznej								
6	G: 8 x Nr 5								
7	H: Nr 1 dla Kerisona oraz Sondy neurochirurgicznej								
8	G: dla bronchofiberoskopu i nasofiberoskopu: Nr 3								

Rezultat 2: Protokół niezgodności

Wpisane w kolumnie:

1	A: Dłuto, Nożyczki naczyniowe, Światłowód								
2	B: dla Dłuta - 1 szt., dla Nożyczek naczyniowych - 3 szt., dla Światłowodu - 2 szt.								
3	C: dla Dłuta - zadziory i wyszczerbienia i/lub uszkodzenie mechaniczne								
4	C: dla Nożyczek naczyniowych - tępe								
5	C: dla Światłowodu - liczne plamy i zaciemnienia obrazu								

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Karta sterylizacji

Wpisane w kolumnie:

1	B: dla Dłuta: 4; dla Nożyczek naczyniowych: 6								
2	B: dla Światłowodu: 3								
3	C: dla Kerisona oraz dla Sondy neurochirurgicznej: Metoda: parą wodną/parowa, Temp.134 °C, Czas 18 min								
4	C: dla Bronchofiberoskopu, Wideolaparoskopu oraz Nasofiberoskopu: Metoda: tlenkiem etylenu/EO, Temp. 55 °C, Czas 60 min								
5	D: 3 x Nr 4								
6	D: dla Kerisona oraz Sondy neurochirurgicznej - Nr 7;								
7	D: 5 x Nr 2								
8	E: 3 x Nr 6								
9	E: 7 x Nr 9								

Rezultat 4: Pakiet z Zestawem diagnostycznym

Egzaminator w celu oceny: R.4.3, R.4.4, R.4.5 otwiera pakiet

1	Zestaw zapakowany jest metodą skośną w dwie warstwy włókniny sterylizacyjnej								
2	Pakiet zamknięty jest taśmami: ze wskaźnikiem oraz bez wskaźnika lub tylko taśmą ze wskaźnikiem								
3	Wewnątrz pakietu na tacy narzędziowej umieszczone są: wziernik nosowy, szpatałka metalowa, pęseta anatomiczna								
4	W pakiecie znajduje się wskaźnik chemiczny wieloparametrowy typu 4								
5	Uchwyty narzędzi skierowane są w jednym kierunku								

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Etykieta

Wpisane:

1	Nazwa zestawu: Zestaw diagnostyczny						
2	Odbiorca: Poradnia Otolaryngologiczna						
3	Data sterylizacji pakietu: Data egzaminu zapisana w formacie dd-mm-rrrr						
4	Data ważności pakietu: Data o 1 rok dłuższa od daty egzaminu (+/- 2 dni) zapisana w formacie dd-mm-rrrr						

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i przygotowanie narzędzi do sterylizacji zgodnie z procedurą
Zdający zgłosi przez podniesienie ręki. Zadanie wykona w obecności egzaminatora.

Zdający:

1	założył czepek, zakrywając nim wszystkie włosy, nie miał założonej biżuterii i zegarka, pobrał środek dezynfekcyjny na suche dłonie, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie, w jednym z etapów pocierał wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi palcami						
2	wybrał z zestawu narzędzi: wziernik nosowy, szpatułkę metalową, pęsetę anatomiczną						
3	skontrolował wizualnie czystość trzech narzędzi						
4	wykonał konserwację nanosząc środek konserwujący na przeguby dwóch narzędzi oraz wykonał ruchy zamykania i otwierania tych narzędzi						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Pakowanie Zestawu diagnostycznego

Kontynuacja oceny przez Egzaminatora.

Zdający:

1	rozłożył na blacie stołu dwa arkusze włókniny sterylizacyjnej w dwóch różnych kolorach i umieścił tacę narzędziową z zestawem narzędzi po przekątnej na środku pierwszego arkusza włókniny sterylizacyjnej						
2	zawinął pierwszy arkusz zakrywając tacę z wyrobami medycznymi, po zapakowaniu tacy pozostawił wypustkę z jednego z narożników włókniny sterylizacyjnej						
3	tacę narzędziową zapakowaną w pierwszy arkusz włókniny sterylizacyjnej umieścił po przekątnej drugiego arkusza włókniny i zawinął drugą warstwę zakrywając zapakowaną tacę narzędziową, po zapakowaniu pozostawił wypustkę z jednego z narożników włókniny						
4	uporządkował stanowisko pracy, wykonał dezynfekcję blatu stanowiska do pakowania narzędzi za pomocą chusteczki dezynfekcyjnej, chusteczkę wyrzucił do kosza na odpady						
5	zdział czepek i wyrzucił do kosza na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis